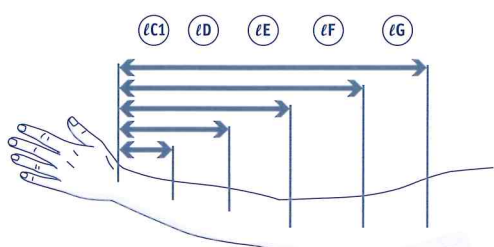
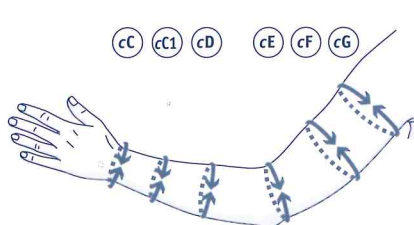
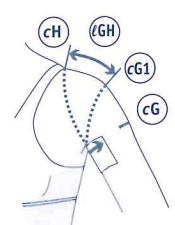
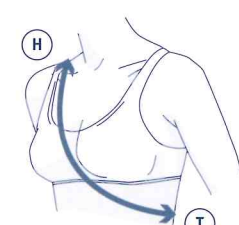
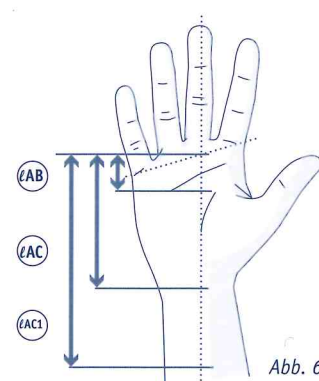
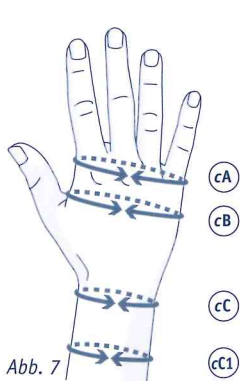
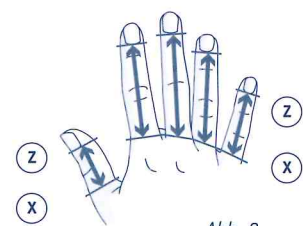
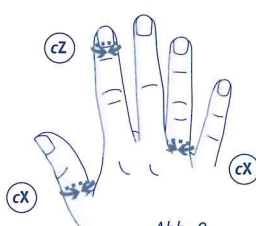


Anmessen von flachgestrickten Versorgungsungen

Arm	Länge	Umfang
<p>Hinweis: Bitte Sie den Patienten Ihnen dabei behilflich zu sein, das Maßband in der Armbeuge festzuhalten.</p> <p>Durch wechselndes „Festziehen“ und wieder „Lockerlassen“ des Maßbandes können Sie z. B. die Gewebebeschaffenheit an der jeweiligen Messstelle erkunden. Danach entscheiden Sie, wie fest gemessen werden muss.</p> <p>Den Arm leicht gebeugt lagern.</p>	 <p>Abb. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> · Längenmesspunkte am Innenarm festlegen · Maßband von der Handgelenkfalte bis zur Ellenbeuge führen · Längenmesspunkte C bis G markieren und notieren (für Oberarmerhöhung, mehr als 3 cm, bitte G bis G1 messen) 	 <p>Abb. 2</p> <p>Die Umfangsmessungen werden bei Ödem-Erkrankungen individuell von Hautmaß bis leichter Zug durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> · die Umfangsmessungen immer mit dem Patienten abstimmen (Druck- und Schmerzempfindlichkeit erfragen)

Schulter	Befestigung
 <p>Abb. 3</p> <p>Schulterkappe Standard lG1 bis lH d.h. bis Ansatz des BH-Trägers messen, dabei ist H die Verlängerung der Achselfalte nach oben (gestrichelte Linie)</p>	 <p>Abb. 4</p> <p>Schulterkappe anatomisch Gewünschte Breite der Schulterkappe angeben, von der vorderen Achselfalte bis zur hinteren Achselfalte messen, in Höhe cG</p>
	 <p>Abb. 5</p> <p>Schultergurt Länge Gurt zirkulär messen</p>

Hand	Länge	Umfang
<p>Hinweis: Die Länge lAB beträgt selten mehr als 4 cm. Die Länge zwischen den Messpunkten C und C1 beträgt in der Regel 6–8 cm.</p> <p>Die Handmaße bei flach aufliegender Hand abnehmen.</p>	 <p>Abb. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> · Maßband um die breiteste Stelle der Hand legen, Position markieren und gleichzeitig Umfangmaß cA erfassen · Vorgang an der Daumengrube wiederholen, Position markieren, Umfangmaß cB erfassen Umfang messen und notieren 	 <p>Abb. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> · lAB, lAC, lAC1 abmessen und notieren · cC Umfang an der Handgelenkfalte messen · cC1 (Abschluss Handschuh) Umfang messen und notieren

Finger	Länge	Umfang
<p>Hinweis: Messen Sie den Fingerumfang niemals fest. Die Durchblutung der Fingerkuppe ist sonst gefährdet.</p> <p>Alle Fingerumfänge zirkulär messen und Daumenlänge beachten.</p>	 <p>Abb. 8</p> <p>Messpunkte für lXZ der Finger 1 bis 5 festlegen</p> <ul style="list-style-type: none"> · Längenmaß von der Schwimmhaut bis zur gewünschten Länge markieren, messen und notieren 	 <p>Abb. 9</p> <p>Umfangmaße cX und cZ der Finger 1 bis 5 nehmen</p> <ul style="list-style-type: none"> · Umfang cX an der Schwimmhaut messen · Umfang cZ an vorher festgelegter Fingerlänge messen